



Agenda

1. Neuerungen 2025
2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke
3. „Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“
4. Modefarben 2026
5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht
6. Austausch

Agenda


1. Neuerungen 2025

2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke
3. „Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“
4. Modefarben 2026
5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht
6. Austausch

Elegantes Schmuckkettchen für den Armstrumpf



Micronoppenhaftband bei Armstrumpf und Wadenstrumpf

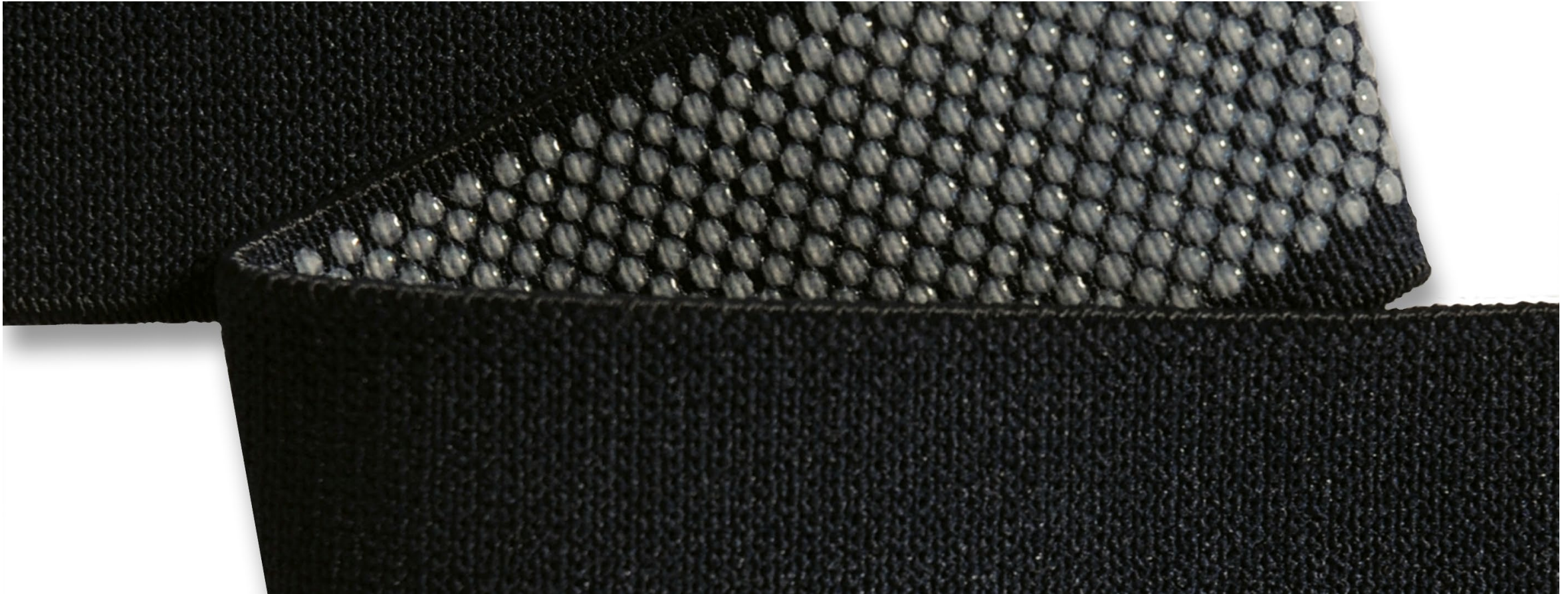

Flachstrick-Modefarben 2025/26 – im Disco-Stil der 70er



Kostenvoranschlag in BOB für Flachstrick

Persönliche Maßbestellung

Patient

Patientenkartei

Pnr	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Kunde	Bestellung
515	Albert	Nina			Historie Neu
519	Arnold	Kerstin			Historie Neu
607	A_Schittenhelm	Steffi			Historie Neu
591	Bauer	Ramona			Historie Neu
602	Belsana	Bella	12.07.2022		Historie Neu

Problem entdeckt?
Benötigen Sie Hilfe?

Hier melden

Persönliche Maßbestellung für Test Test

BELSANA impuls

Unser flachgestrickter Kompressionsstrumpf für die wirksame Ödemtherapie: Klimaregulierend, atmungsaktiv und angenehm zu tragen durch die natürlichen Eigenschaften der Merinowolle.

Bitte wählen Sie die Körperregion und Kompressionsklasse

Arm-/Handversorgung

Wählen Sie aus einer Vielzahl von individuellen Flachstrickversorgungen für Arm und Hand. Standardmäßig mit anatomischen Ellenbogen.

Bein-/Fußversorgung

Wählen Sie aus einer Vielzahl von individuellen Flachstrickversorgungen für Bein und Fuß.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an unseren Kundenservice.

Tel.: 0951309303-0
E-Mail: lymphologie@belsana.de

BELSANA Microsoft Fersenoptimierung

- Qualitäten BELSANA microsoft und Spring® fino Kniestrümpfe in Maß und Serie umgestellt:
 1. Die Passform der Ferse wurde optimiert.
 2. Druck am Fuß wurde verringert und das Anziehen des Strumpfes wird erleichtert

BELSANA Microsoft Fersenoptimierung



Produktoptimierung bei Leibteil Belsana comfortis

- Optimiertes und verbessertes Leibteil bei BELSANA comfortis für optimalen Halt und erhöhten Tragekomfort dank Plus-Minus-Leibteil und stärkerem Faden in Leibteil und Zwickel
- verbesserte Passform bei weichem Bindegewebe und vermeidbare Einschnürungen durch einen optimierten Übergang vom Kompressionsteil in die Hose

Produktoptimierung bei Leibteil Belsana comfortis



Stützstrumpfsortiment SKY SOCKS

Ab sofort gibt es zwei frische, neue Farben:



lime



wild berries

Dafür verlassen diese Farben unser Sortiment:



sunflower



bordeaux

**Abverkaufsaktion:
SKY SOCKS Classic Kniestumpf in den Farben sunflower und bordeaux!
Solange der Vorrat reicht!**

Übersicht SKYSOCKS – Farben und Größen

	Classic 70 DEN								
	black	graphit	navy	safari	sand	red	blue	sunflower	berry
36/37									
38/39									
40/41									
42/43									
44/45									

88% Polyamid | 12% Elasthan



	Cotton 280 DEN				
	black	graphit	navy	safari	sand
36/37					
38/39					
40/41					
42/43					
44/45					
46/47					

56% Polyamid | 27% Cotton | 17% Elasthan



Die aktuellen Farben finden Sie immer unter:
www.spring-medical.de/skysocks

Aktuelle Europäische Verordnungen und Gesetze

EU-Produktsicherheitsverordnung (PSVO)

- **Ziel:**
Sicherheit von Nicht-Lebensmittelprodukten auf dem EU-Markt erhöhen, in dem Hersteller z.B. dazu verpflichtet werden, ausführliche Informationen bereitzustellen
- **Auswirkung:**
Veränderte Produktkennzeichnung z.B. E-Mail-Adresse muss auf jedem Produkt angebracht werden

Medical Device Regulation (MDR)

- **Ziel:**
Regulation des Inverkehrbringens, der Bereitstellung und der Inbetriebnahme von Medizinprodukten
- **Auswirkung:**
Andauernder Prozess, neu ist die UDI-Kennzeichnungspflicht

Gesetzliche Neuerung: Unique Device Identification

- UDI-Markierung auf allen BELSANA-CE-Produkten durchgeführt
 - → Datamatrixcode auf Verpackung (bestehend aus UDI-DI, Herstell- bzw. Verfallsdatum und LOT-Nummer)
- Wenn seitens EUDAMED alles bereit:
 - Innerhalb von 6 Monaten ab dem Stichtag Anmeldung aller neuen Produkte in EUDAMED
 - Innerhalb 12 Monaten ab dem Stichtag Anmeldung aller Bestandsprodukte in die EUDAMED

BELSANA comfortis

AD	lang long	holunder elderberry blue	4 0 1 8 8 3 8 4 1 4 5 6 8
KKL.: 2		offene Spitze, lang	
Ccl		open toe, long	c B 20,1 - 22,0
Gr.: II		Effekt-Haftband	c D 30,0 - 38,0
Size		effect grip top	e D 38,1 - 43,0

REF 21 5301 0658 0550

LOT D763087M


2028-12

PZN: 12243713

HVN: 17.06.01.1172
17.99.99.2008

UDI
(01)04018838414568
(17)281231
(10)D763087M

RAL
GÜTEZEICHEN
MEDIZINISCHE
KOMPRESSIONS-
STRÜMPFE

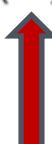

Aktuelle Europäische Verordnungen und Gesetze

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Ziel:

- Verpackungsabfälle deutlich zu verringern, die Recyclingfähigkeit zu verbessern und den Anteil an wiederverwendbaren Verpackungen zu erhöhen

Auswirkung:

- Neue MKS-Verpackungen waren notwendig aufgrund der Plastikteile an alter Verpackung
- Zukünftig sind (mit wenigen Ausnahmen) keine Doppelwände mehr in Verpackungen erlaubt

Aktuelle Europäische Verordnungen und Gesetze

Empowering Consumers Richtlinie und Green Claims Directive

Aussagen über Nachhaltigkeit werden zukünftig zum Schutz der Verbraucher strenger reguliert als bisher, durch folgende Verordnungen: Green Claims Directive, UWG und EmpCo

- **Auswirkung:**
 - Aussagen wie „nachhaltig“, „grün“, „gut für die Umwelt“ werden verboten, sowie eigene Nachhaltigkeitssiegel
 - Aussagen müssen belegbar und überprüfbar sein
 - Empco wird bis September 2026 ins nationale Gesetz umgesetzt
- Wir müssen unsere evo®lution und Q-Cycle® Kommunikation und Werbemittel überarbeiten

Agenda


1. Neuerungen 2025
- 2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke**
3. „Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“
4. Modefarben 2026
5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht
6. Austausch

Haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal als VFC?


Ergebnis Workshop 2024!




Zahlen, Daten, Fakten

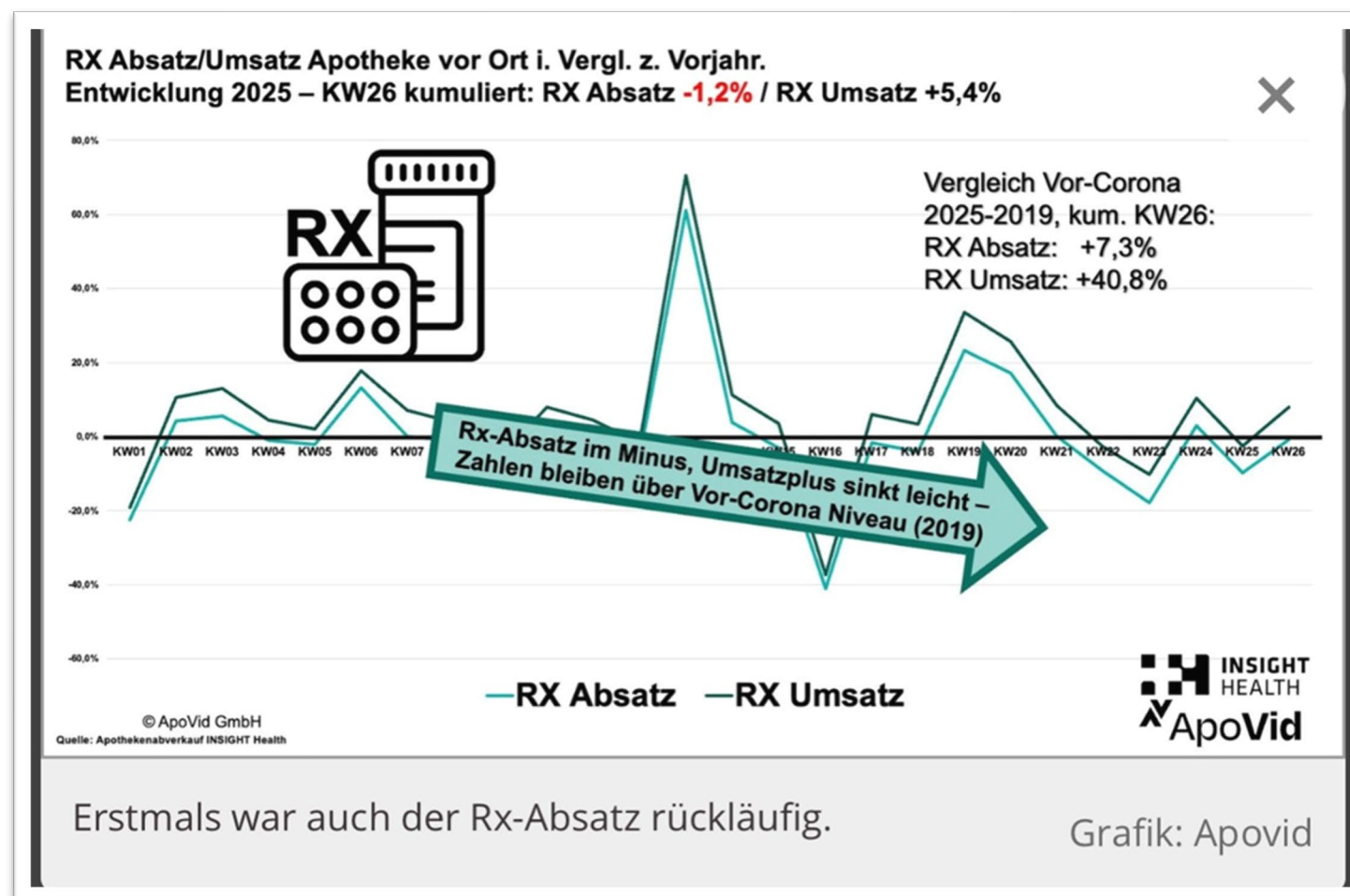

Zahlen, Daten, Fakten

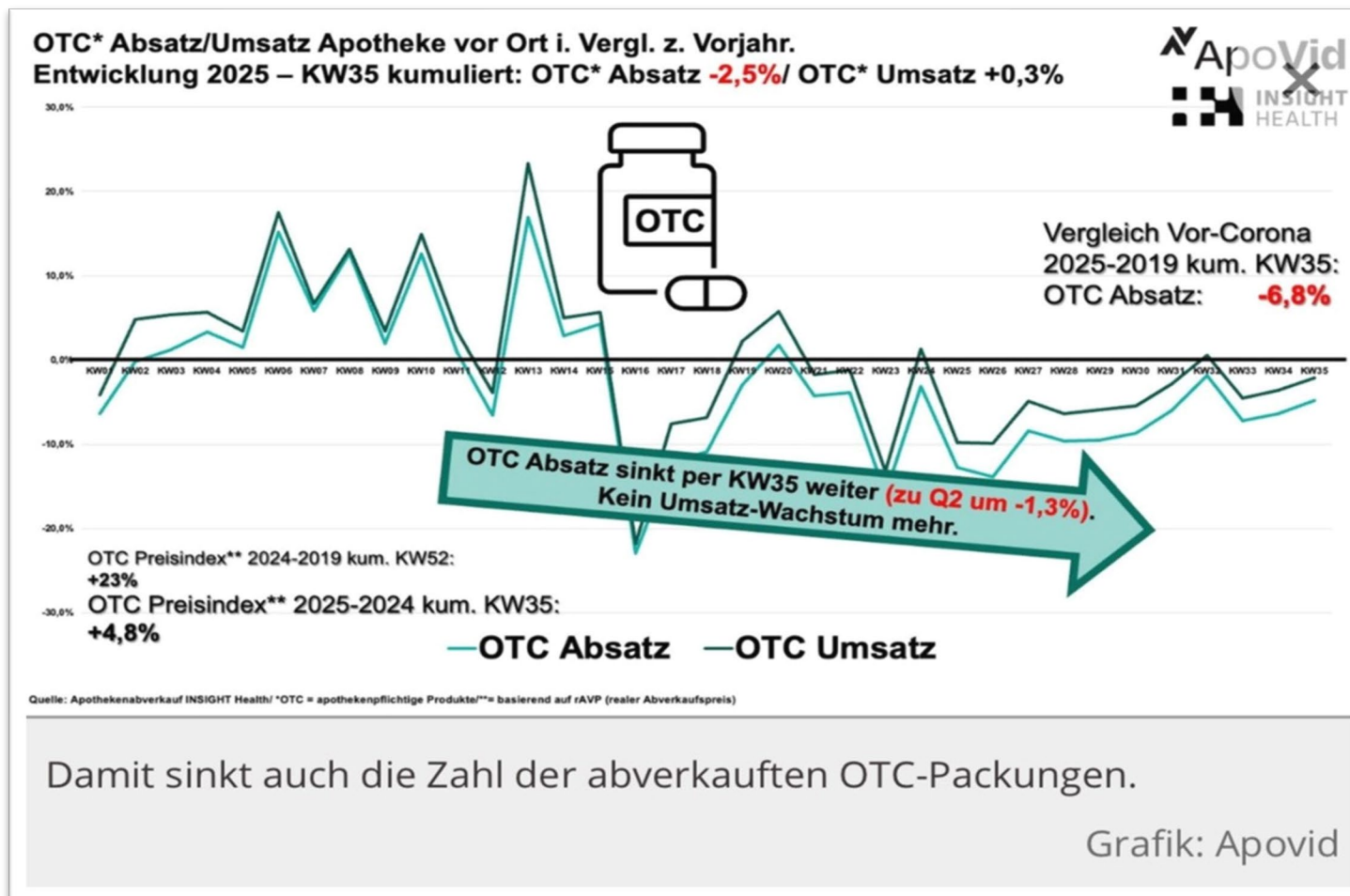


Zahlen, Daten, Fakten

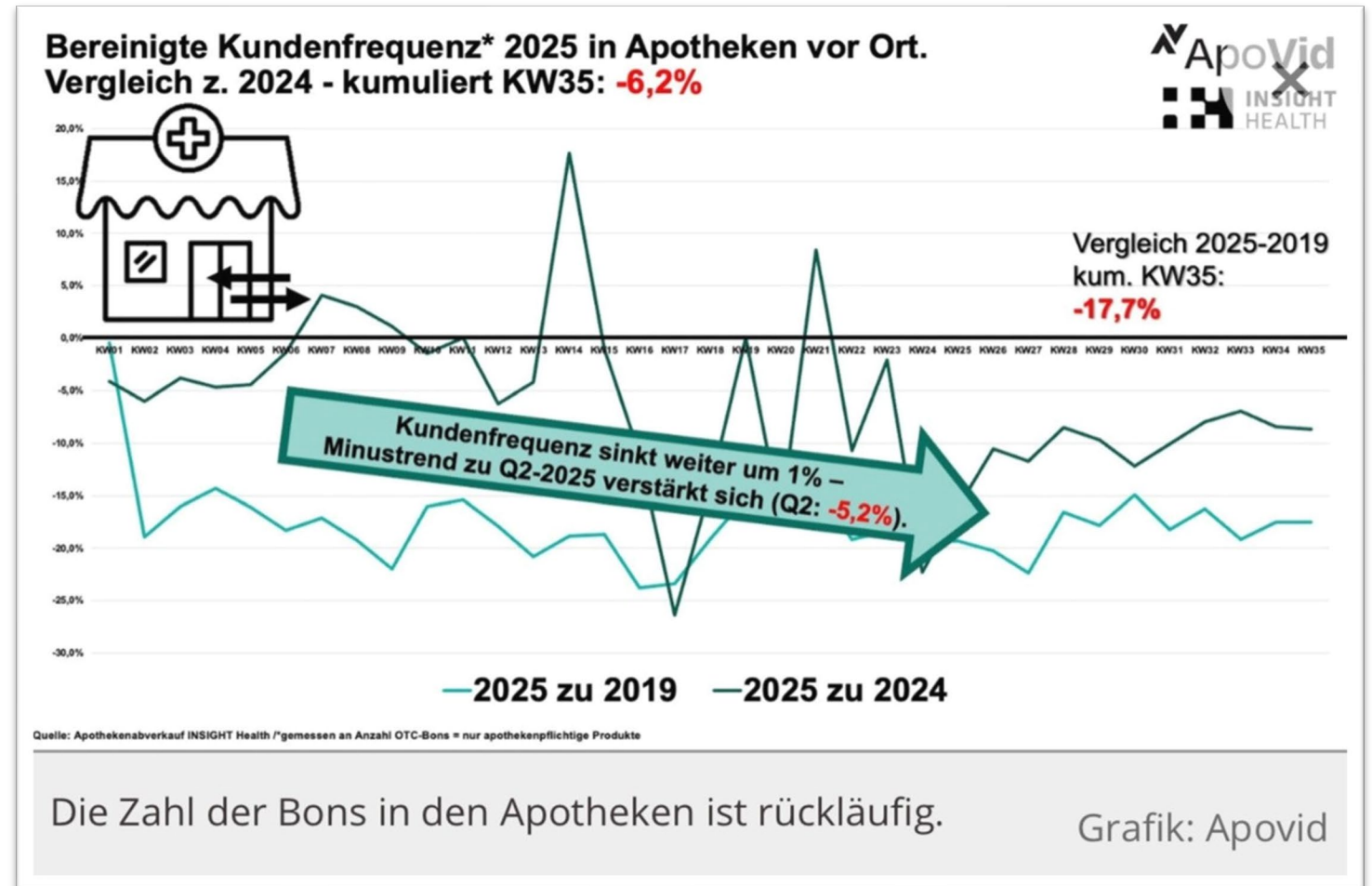

Versorgungsfälle gesamt - PG 17

Jahr	Versorgungsfälle	Veränderung zum Vorjahr (%)
2019	3.016.974	—
2020	2.797.856	-7,27 %
2021	2.907.743	+3,93 %
2022	2.988.972	+2,79 %
2023	3.115.897	+4,24 %
2024	3.196.596	+2,59 %

Versorgungsfälle Apotheke – PG 17

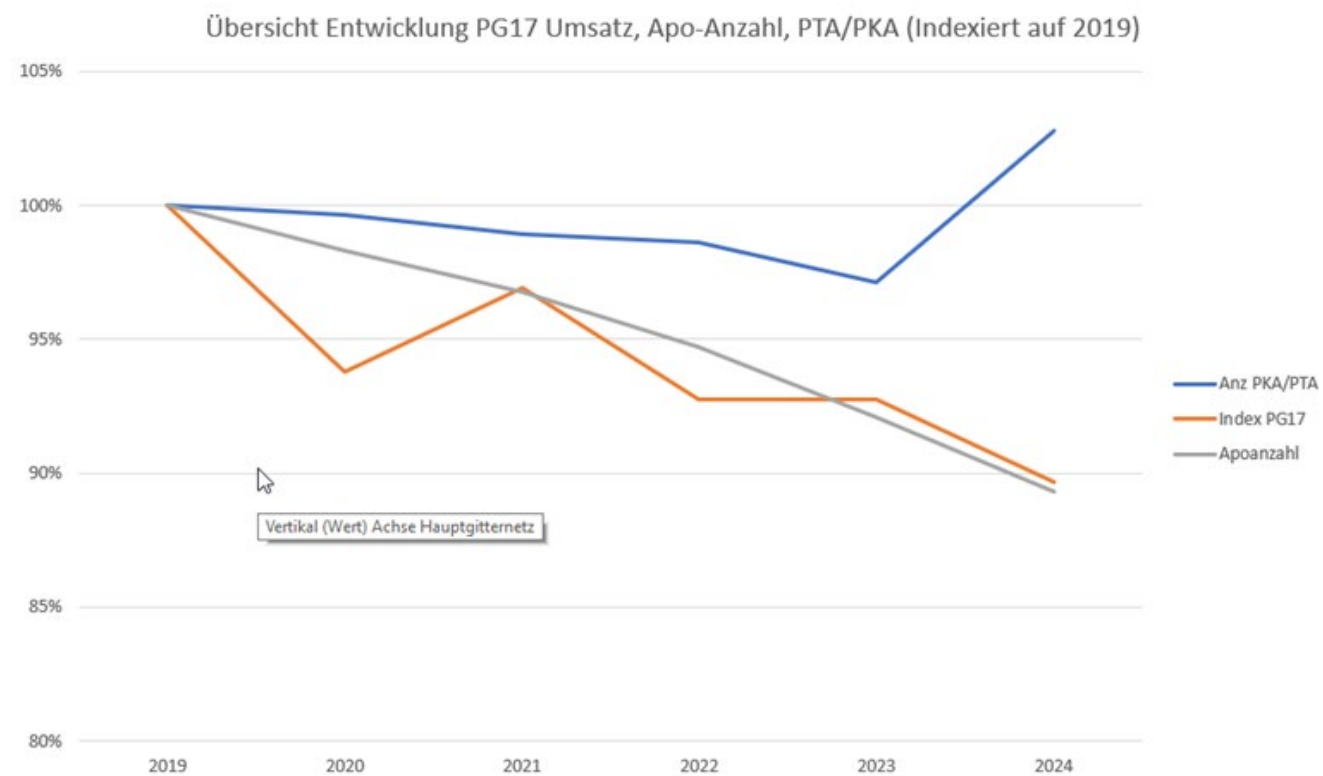

Quelle: ProVen



Apotheken-Zukunft?

Quelle: Stern Til Mette, bearbeitet von BELSANA

Der wertvolle Hilfsmittelpatient ...



Ca. 700.- Euro Apothekenumsatz pro Einwohner

- (Rx + HiMi + OTC / Freiverkauf) Quelle: Basierend auf ABDA
ZDF 2021: Gesamtumsatz/ Einwohner Deutschlands

Ca. 2000.- Euro Kundenwert Kompressionstrumpf Patient


- (Rx + HiMi ohne OTC/ Freiverkauf)

Ca. 3150.- Euro Kundenwert bei gleichzeitigem Diabetes

- (Rx+ HiMi ohne OTC/ Freiverkauf)

Quelle: Leipziger Gesundheitsforen/ Provendata on file

Eigenbeteiligung des Kunden

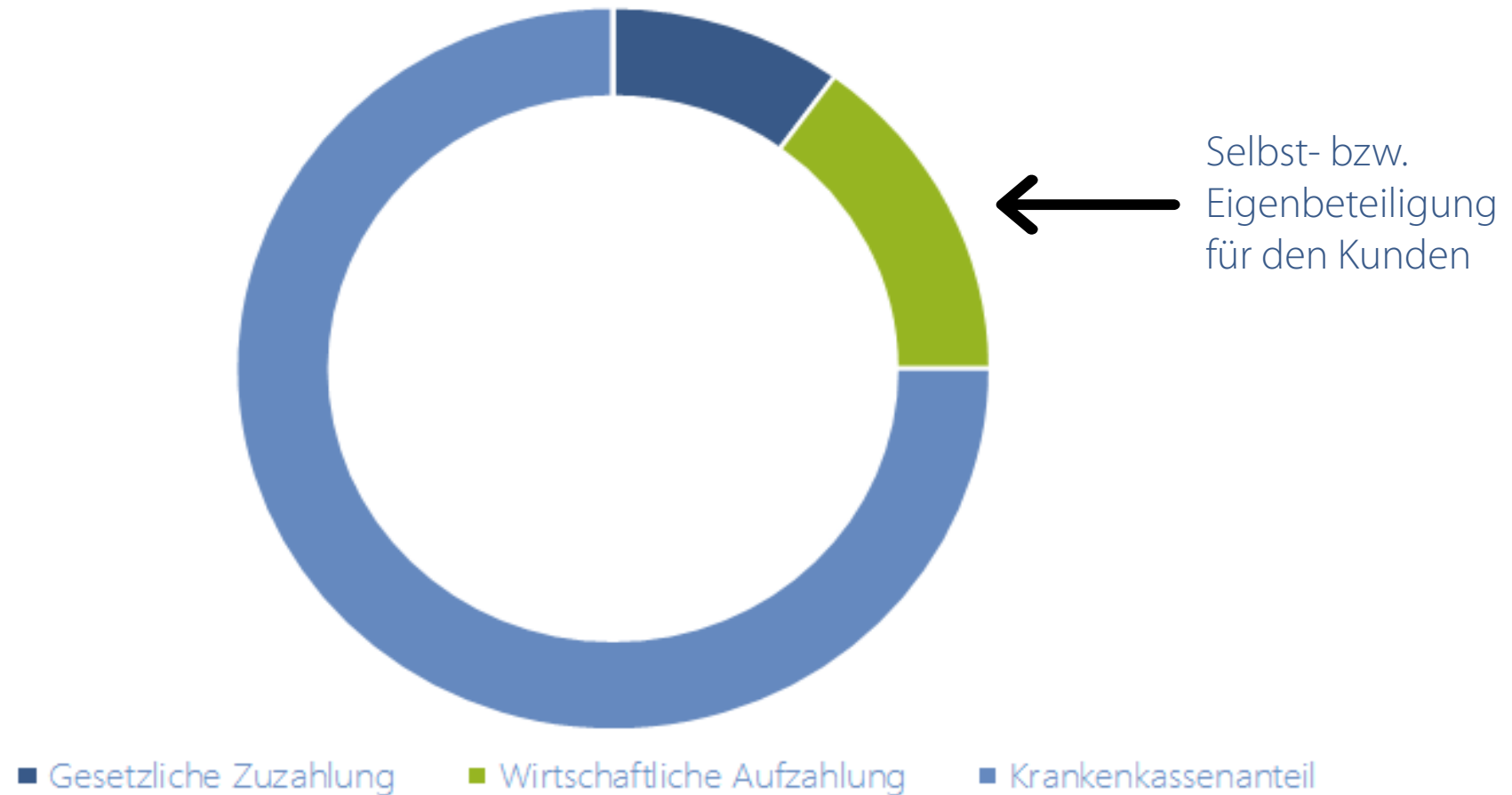

Beste Rendite mit Hilfsmitteln

Großmargenberechnung HV-Arbeit (nur Rx)	
Durchschnittlicher Rx-Packungswert (in €)	50,00
Festzuschlag pro Packung (in €)	6,67
Prozentualer 3% Aufschlag	1,50
Einkaufsrabatt 3% pro Rx Versorgung	1,50
Rohrertrag pro Rx-Packung	9,67
Anzahl Rx-Packung pro Rezept	1,40
Rohrertrag pro Rezept (in €)	13,54
Arbeitszeit pro Geschäftsvorfall	6 min 24 Sek
Geschäftsvorfälle pro Stunde	9,40
Rohrertrag pro Stunde (in €)	127,26

Quelle: Herzog, AWA 7/2024

Großmargenberechnung PG17 Versorgung Kniestrumpf	
Maßversorgung	
Marge Basisversorgung (in €)	20,19
beinhaltet Rechnungsrabatt*	5%
beinhaltet Skonto	3%
wirtschaftl. Aufzahlung Kunde (frei wählbar)	10,00
Rohrertrag pro Rx-Versorgung	30,19
Anzahl pro Versorgung (Paar)	1,00
Rohrertrag pro Rezept (in €)	30,19
Arbeitszeit pro Geschäftsvorfall	15,00
Geschäftsvorfälle pro Stunde	4,00
Rohrertrag pro Stunde (in €)	120,76

*Machen Sie die Probe aufs Exempel mit dem **Ertragsrechner**.



Es rechnet sich:

Drei Tatsachen sprechen für die Kompressionsstrumpf-Versorgung.

B.

FAKT 1

Beste Rendite.
Eine Beispiel-Rechnung.

Großmargenberechnung HV-Arbeit (nur Rx)	
Durchschnittlicher Rx-Packungswert (in €)	50,00
Festzuschlag pro Packung (in €)	6,67
Prozentualer 3% Aufschlag	1,50
Einkaufsrabatt 3% pro Rx Versorgung	1,50
Rohertag pro Rx-Packung	9,67
Anzahl Rx-Packung pro Rezept	1,40
Rohertag pro Rezept (in €)	13,54
Arbeitszeit pro Geschäftsvorfall	6 min 24 Sek
Geschäftsvorfälle pro Stunde	9,40
Rohertag pro Stunde (in €)	127,26

Quelle: Herzog, AWA 7/2024

Großmargenberechnung PG17 Versorgung Kniestrumpf Maßversorgung	
Marge Basisversorgung (in €)	20,19
beinhaltet Rechnungsrabatt*	5%
beinhaltet Skonto	3%
wirtschaftl. Aufzahlung Kunde (frei wählbar)	10,00
Rohertag pro Rx-Versorgung	30,19
Anzahl pro Versorgung (Paar)	1,00
Rohertag pro Rezept (in €)	30,19
Arbeitszeit pro Geschäftsvorfall	15,00
Geschäftsvorfälle pro Stunde	4,00
Rohertag pro Stunde (in €)	120,76

*Machen Sie die Probe aufs Exempel mit dem **Ertragsrechner**.



FAKT 2

Nur bei Ihnen vor Ort.
Umsatz sicher vor dem Online-Handel.

- ✓ Unschlagbarer Standortvorteil:
als pharmazeutische Dienstleistung vor dem Online-Wettbewerb geschützt
- ✓ Kaum Apotheken-Hopping durch persönlich verbindlichen Service
- ✓ Wachstumschancen lokal: neue Kunden gewinnen und als Stammkunden begleiten

FAKT 3

Langfristiger Umsatz.
Alle 6 Monate eine neue Versorgung und Zubehör.


- ✓ Stabiler Markt Kompression:
⅓ der Bevölkerung leiden lebenslang unter Venenproblemen, Tendenz steigend
- ✓ Zusatzverkäufe ohne Überzeugungsarbeit durch benötigtes Zubehör
- ✓ Ausbau zum Gesundheitszentrum mit Fokus auf die Begleitung der Kompressionstherapie

Fazit: Die Versorgung mit MKS lohnt sich!

- Kundenbindung
- Ganzheitliche Versorgung
- Zusatzverkauf durch Therapieergänzung
- Umsatzsteigerung
- Sicherung des Standortes
- Neukunden
- Imagegewinn/guter Ruf/Weiterempfehlung
- Steigerung Servicekompetenz



Was machen Sie anders als andere? Ergebnis Workshop 2024

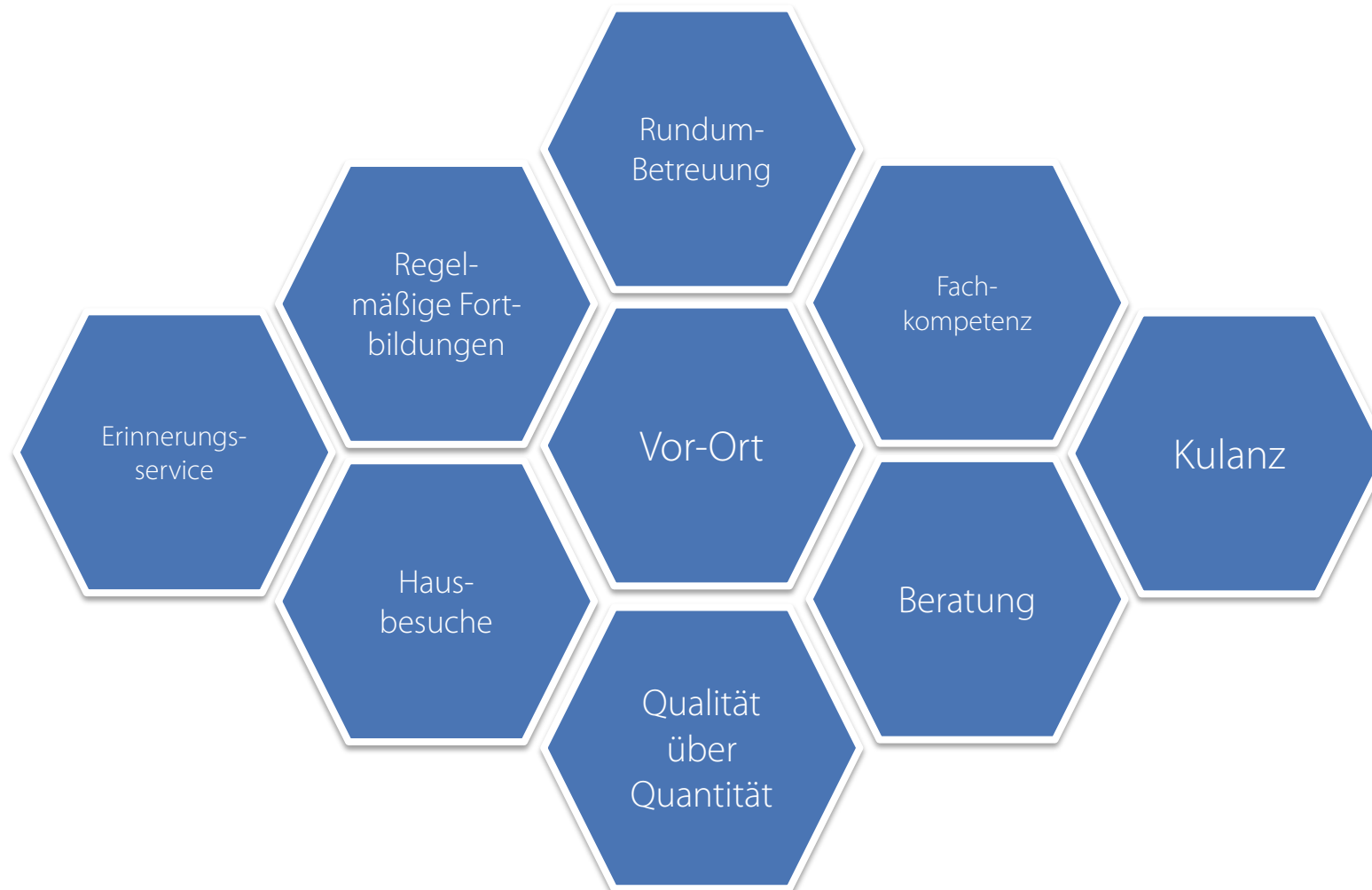


Übersicht über die Produktvorteile von BELSANA Qualitäten

Für jedes Kundenbedürfnis der richtige Strumpf.

	spezielle Ausführungen	innovativ	strapazierfähiger Allrounder	komfortabler Fußbereich	leichteres Anziehen dank Komfortzonen	große Haftband-Auswahl	jährlich wechselnde Modefarben	transparente Optik	hautfreundlich dank Naturfaser	langanhaltende Hautpflege	RS Rundstrick	FS Flachstrick
RS classic BEWÄHRTE QUALITÄT SEIT 30 JAHREN Für fast jeden: Klassische Kompressionsstrümpfe, zeitlos und strapazierfähig			+	+		+						RS classic Baumwolle NATÜRLICH AUF DER HAUT Für Naturfaser-Fans: Klassische Kompressionsstrümpfe mit hautfreundlicher Baumwolle
RS microsoft FÜR DEN ELEGANTEN AUFTRIIT Für Modebewusste: Modische Kompressionsstrümpfe mit atmungsaktiver Mikrofaser und anteilig mit Q-Cycle® Garn aus recycelten Bestandteilen von Altreifen.*		+		+		+	+	+				RS vivere FÜR TROCKENE UND GESTRESSTE HAUT Für empfindliche Haut: Innovative Kompressionsstrümpfe mit feuchtigkeitsspendender Aloe vera und Vitamin E
RS comfortis WEICH IM GEFÜHL, STARK IN DER WIRKUNG Für besonderen Komfort: Moderne Kompressionsstrümpfe mit integrierten Komfortzonen	+	+	+	+	+	+						RS evo^{lution} NACHHALTIG PRODUZIERT FÜR DIE WELT VON MORGEN Für Umweltbewusste: Medizinische Kompressionsstrümpfe mit Biopolymer-Fasern aus Rizinusöl, gefärbt mit Extrakt aus den grünen Schalen der Walnuss.**
RS power DEZENTE FARBEN, ZUVERLÄSSIGE WIRKUNG Für den Mann: Moderne Kompressionsstrümpfe in blickdichter Optik, mit Rippstruktur und mit hohem Anteil an strapazierfähiger Baumwolle			+	+	+				+			FS impuls KLIMAREGULIEREND, ANGENEHM ZU TRAGEN Für Ödem-Patienten: Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe mit natürlichen Eigenschaften der Merinowolle

BELSANA comfortis

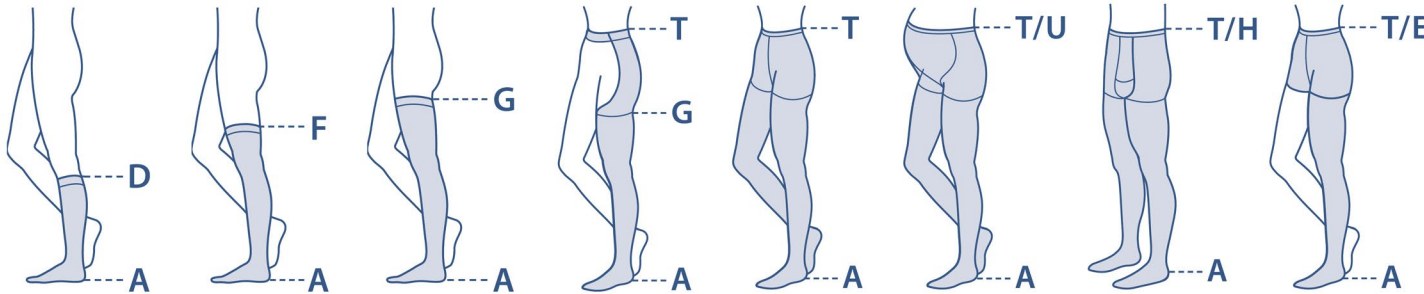

Produkteigenschaften:

- Strapazierfähiges Gestrick
- Komfortzonen an Kniekehle und Spann
- Verstärkte Ferse
- Hoher Tragekomfort für ein angenehmes Hautgefühl
- Material: 67 % Polyamid, 33 % Elasthan



BELSANA comfortis



Besonders geeignet für:

- Männer und Frauen
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Schwaches Bindegewebe
- Patient*innen, die viel sitzen
- Patient*innen in Pflegebetreuung
- Patient*innen mit begrenzter Mobilität
- Modebewusste



BELSANA comfortis

Key facts:

- KKL.1 und KKL.2
- Serie und Maß
- geschlossene und offene Spitze
- 4 Haftbänder für AG
- 3 Haftbänder für AD

Serienkompetenz:

- 6 Seriengrößen
- Große Toleranzbereiche innerhalb der 6 Größen
- Plus-Weite für A-G mit Haftband
- 2 Fußlängen bei offener und geschlossener Fußspitze
- 2 Beinlängen



Offene Spitze – Komfortabschluss



- breites, flaches, stabiles Abschluss-bündchen
- verstärkte „Grip-Struktur“
- nahtfreier Übergang
- Angenehmer Halt und Sitz
- keine unangenehmen Druckstellen unter dem Ballen
- kein Einschneiden
- kein Zurückrutschen
- keine Faltenbildung

Geschlossene Softspitze



- angenehme Zehenfreiheit
- weiche Spitzennaht, weiches Material
- keine Druckstellen
- blickdicht und strapazierfähig

Asymmetrische Softspitze (Maß)



- anatomisch genäht (Form von Zehen nachempfunden)
- keine Druckstellen am großen Zeh
- weiche Spitzennaht, weiches Material
- geeignet bei einem langen großen Zeh

Variable Softspitze (Maß)



- speziell bei Hallux-Valgus oder einer veränderten Fußform
- Länge der Spitzenlänge variabel wählbar (min: 5cm / max: 10cm)
- extrem weiches Material, keine Druckstellen, nahtloser Übergang von Strumpf zu Spitzenmaterial

Verstärkung Fußsohle



- Verstärktes Material
 - um und unter der Ferse
 - unter dem Ballen
- Fußwölbung ausgespart, um Schweißentstehung zu vermeiden

Komfortzonen




A-D




Strickbündchen



Effekthaftband
(breit – Maß und Serie)

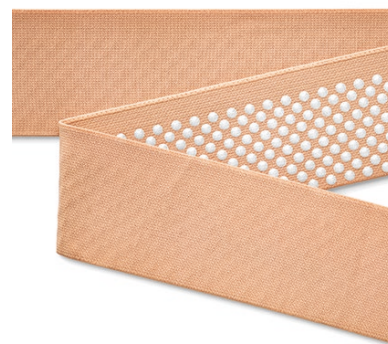

Noppenhaftband
(schmal & breit –
Maß und Serie)

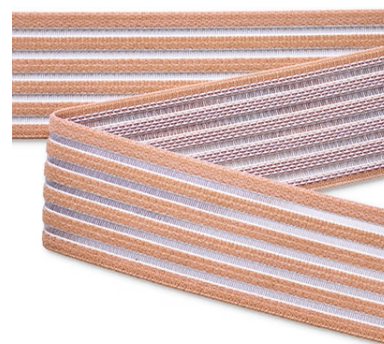

Gummihaftband
(schmal & breit – Maß)

A-F immer Maß




A-G




Noppenhaftband Fleur
(breit – Maß und Serie)



Effekthaftband
(breit – Maß und Serie)

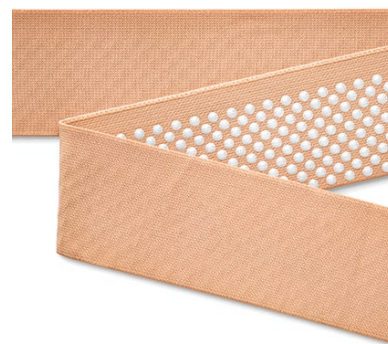


Noppenhaftband
(breit – Maß und Serie)

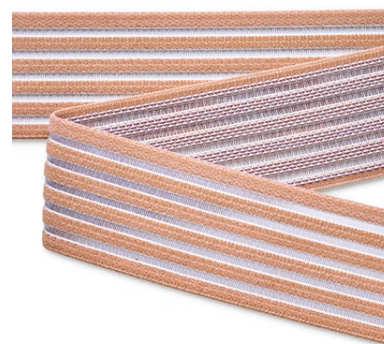

Gummihaftband
(breit – Maß)

Noppen-Haftband strong Maß

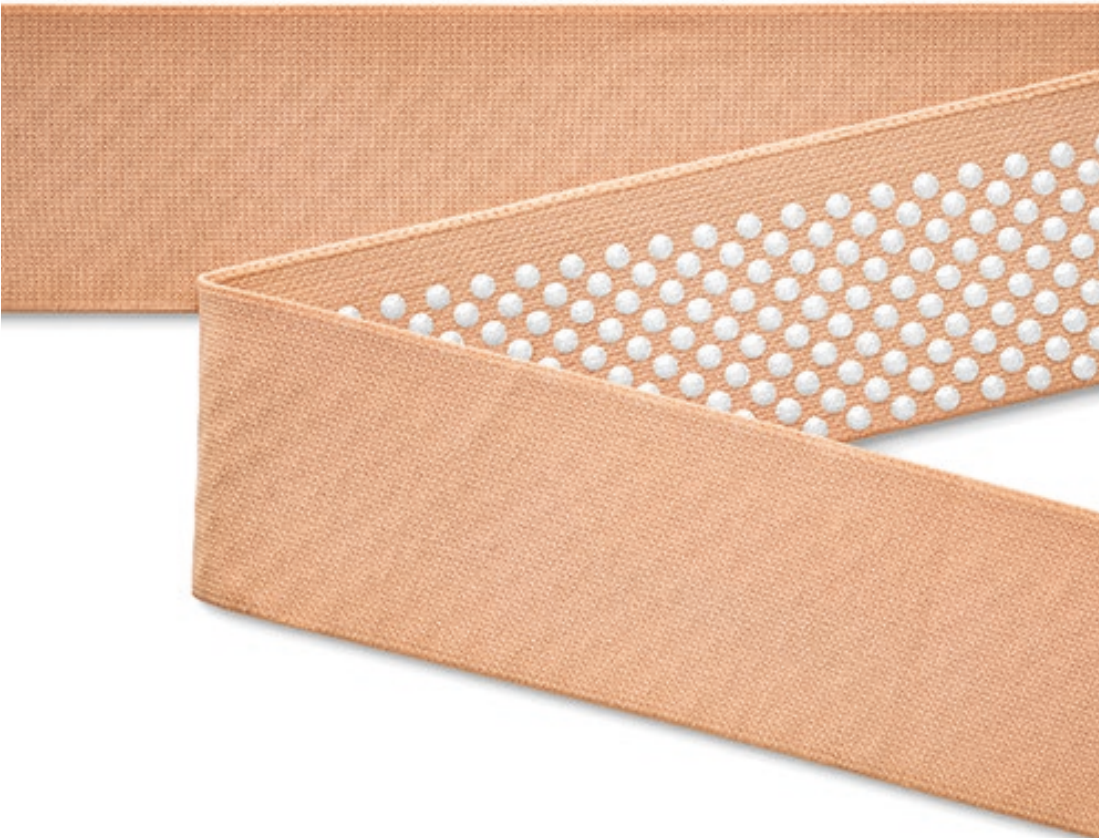

- Breit, optisch identisch zu Noppen-Haftband
- Erhältlich für A–F, A–G Maß und A–G Serie (nur in KKL 2)

A-T Leibteil



Sonderversionen



Extraweites Leibteil



Komfortzwickel
(entscheidet die
Maschine)



Offenes
Umstandsleibteil A-T/U

und kompressives Leibteil


Sonderversionen



offener Schritt /
Öffnung für Katheter



Einbeinhose A-T/E

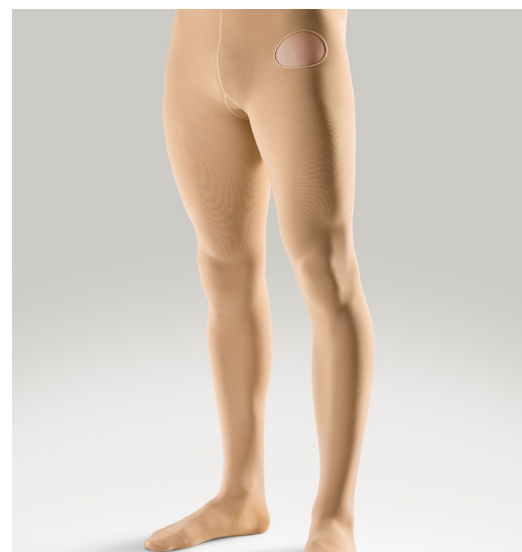

Stomaöffnung

und verstärkter Schritt

Anmessen von med. Kompressionstrümpfen Rundstrick

Gute Passform beginnt mit dem richtigen Anmessen


Das fachgerechte Maßnehmen ist die entscheidende Voraussetzung für eine exakte Passform des Strumpfes und den medizinisch richtigen Druckverlauf am Bein. Gut sitzende Strümpfe verbessern die Akzeptanz der Kompressionstherapie beim Patienten.

Maßschema (alle Maße in cm)

Erläuterungen Messpunkte siehe Tabelle rechte Seite)

Linkes Patientenbein

Länge Umfang

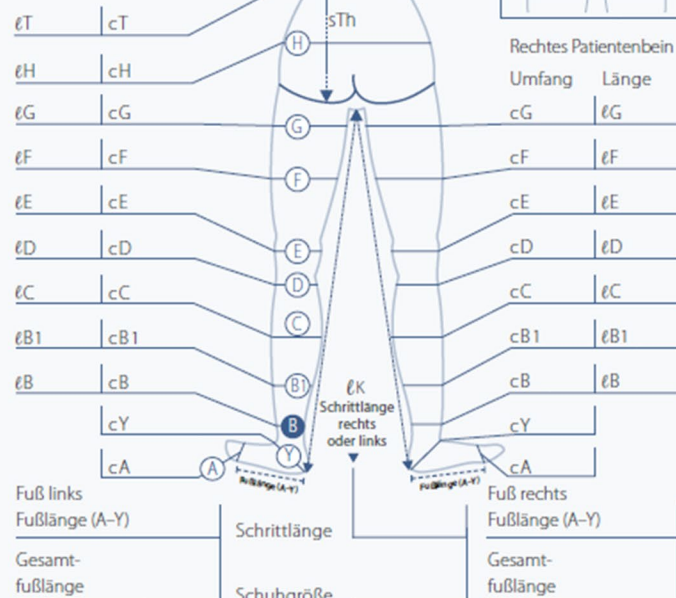

Erläuterungen Messpunkte siehe Tabelle

Gemessen wird wie folgt:

Langzeit-Anwendungsgebiete:

- Am unbedeckten, ödemfreien Bein (Fingerdruckprobe im Fesselbereich: Bei Wasseransammlungen bleibt eine Delle).
- Der Patient kann liegen, sitzen oder stehen.
- Der Fuß sollte einen 90°-Winkel zum Bein bilden.
- Die Muskulatur ist entspannt und das Maßband liegt an der Haut an.
- Arbeiten Sie mit Maßbrett, ermitteln Sie die Umfangmaße und lesen Sie die Längenmaße direkt am Maßbrett ab. Alternativ können die verschiedenen Messpunkte der Umfangmaße mit einem Hautstift (z.B. BELSANA Hausstift) markiert werden. Die Längenmaße können anhand der markierten Stellen im Stehen oder Liegen ermittelt werden.
- Die Längenmaße an der Außenseite bzw. an der Innenseite ablesen.
- Umfang- und Längenmaße der Punkte G bis T immer im Stehen messen.
- Fußmaße (Gesamtfußlänge, Fußlänge und cA) im Stehen messen.

Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
T	cT Taille	lT* Messpunkt cT bis Ferse sTv Schritt bis cT vorne senkrecht nach sTh Po-Beinfalte bis cT hinten oben messen
H	cH Umfang an der breitesten Stelle des Beckens/Gesäß (zwischen Schritt und Taille)	lH* Messpunkt cH bis Ferse lK* Schritt bis Ferse
G	cG Etwa Oberschenkelende (zwei Finger breit unterhalb des Schrittes)	lG* Messpunkt cG bis Ferse
F	cF Etwa Oberschenkelmitte	lF Messpunkt cF bis Ferse
E	cE Umfang Kniescheibe-Kniekehle (bei leicht gebeugtem Knie)	lE Messpunkt cE bis Ferse, Bein gestreckt
D	cD Umfang am Tibiakopf (ca. zwei fingerbreit unter der Kniescheibe und der Kniekehle)	lD Messpunkt cD bis Ferse
C	cC Größter Wadenumfang	lC Messpunkt cC bis Ferse
B1	cB1 Umfang in der Mitte von lB und lC	lB1 Messpunkt cB1 bis Ferse
B	cB Fesselumfang (schlankeste Stelle Unterschenkel, kleinster Beinumfang)	lB Messpunkt cB bis Ferse
Y	cY Umfang Ferse-Spann (bei maximaler Beugung des Fußes nach oben)	
A	cA Umfang am Kleinzehengrundgelenk	Fußlänge Messpunkt Kleinzehengrundgelenk bis Ferse Gesamt-fußlänge Längste Zehenspitze bis Ferse

Bezeichnungen und Kürzel gemäß der RAL (verbindlich seit 01.07.2002) * Maßband am Punkt cD und cF am Bein andrücken

Hinweis zu Kunden mit Halux Valgus und Diabetes

Wir empfehlen eine geschlossene Softspitze, jedoch bei schmerzhafter und/oder veränderten Fußform eine variable Softspitze (BELSANA comfortis).


Anmessen:

- **Geschlossene Softspitze:** cA wird vom Kleinzehengrundgelenk über das Großzehengrundgelenk gemessen (in diesem Fall kann das Maßband etwas schräg liegend, die Fußlänge bleibt gleich)
- **Variable Softspitze:** cA wird hinter dem Halux bzw. hinter dem Groß- und Kleinzehengrundgelenk (Richtung Spann) angelegt; dadurch verkürzt sich die Fußlänge. Die Länge der Softspitze ist variabel (mind. 5 cm max. 10cm).

Gute Passform beginnt mit dem richtigen Anmessen

- Das fachgerechte Maßnehmen ist die entscheidende Voraussetzung für eine exakte Passform des Strumpfes und den medizinisch richtigen Druckverlauf am Bein. Gut sitzende Strümpfe verbessern die Akzeptanz der Kompressionstherapie beim Patienten.

Maßschema (alle Maße in cm)
Erläuterungen Messpunkte
siehe Tabelle rechte Seite)

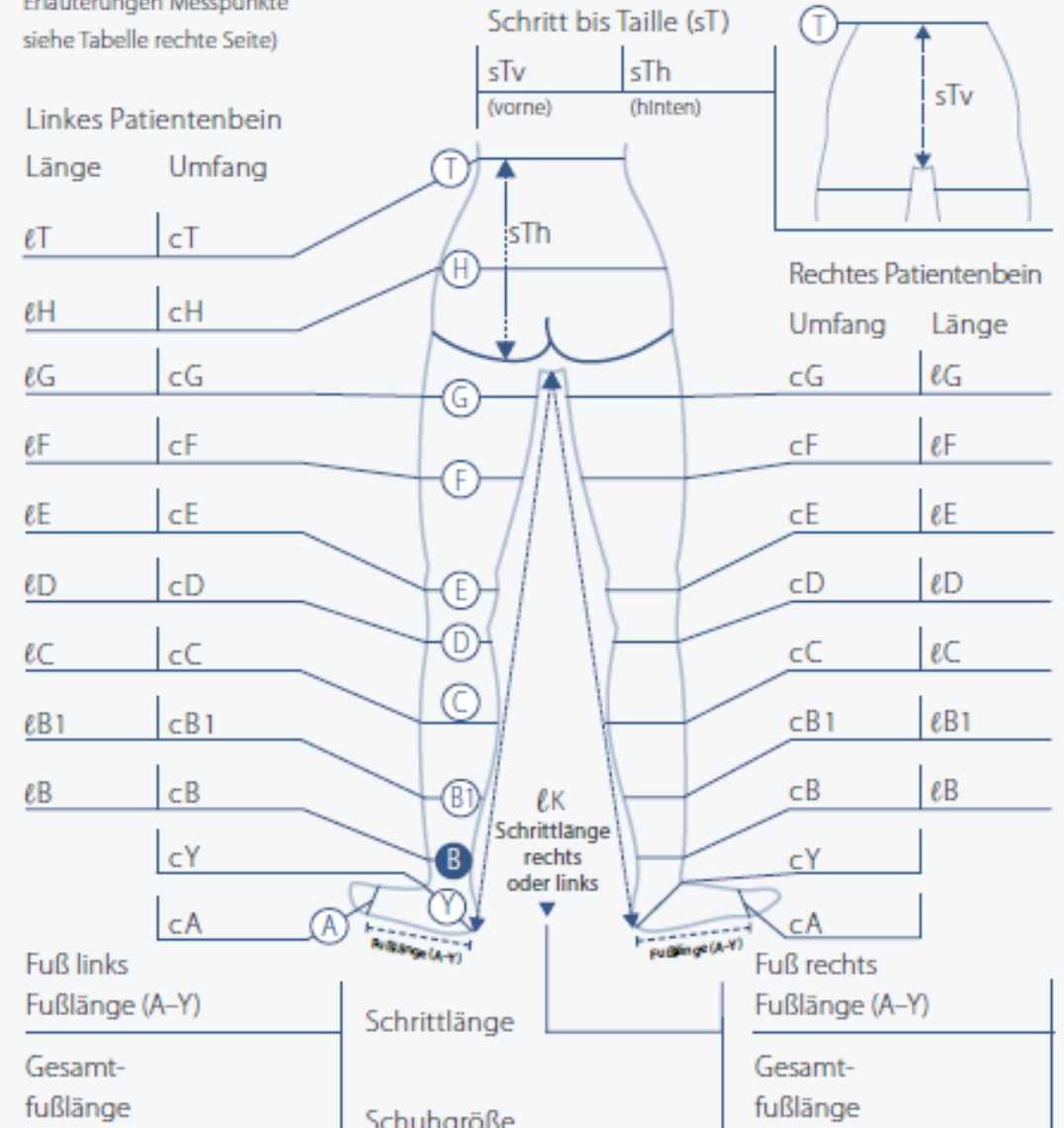

Gemessen wird wie folgt:

- **Am unbekleideten, ödemfreien Bein** (Fingerdruckprobe im Fesselbereich: Bei Wasseransammlungen bleibt eine Delle).
- Der Patient **kann liegen, sitzen oder stehen**.
- Der **Fuß sollte einen 90°-Winkel zum Bein** bilden.
- Die Muskulatur ist entspannt und das **Maßband liegt an der Haut an**.
- Arbeiten Sie mit Maßbrett, ermitteln Sie die Umfangmaße und lesen Sie die Längenmaße direkt am Maßbrett ab.
- Alternativ können die verschiedenen Messpunkte der Umfangmaße mit einem Hautstift (z.B. BELSANA Hausstift) markiert werden.
- Die Längenmaße können anhand der markierten Stellen im Stehen oder Liegen ermittelt werden.
- Die **Längenmaße** an der **Außenseite bzw. an der Innenseite** ablesen.
- Umfang- und Längenmaße der **Punkte G bis T immer im Stehen** messen.
- **Fußmaße** (Gesamtfußlänge, Fußlänge und cA) **im Stehen** messen.

Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (ℓ = length)
Ⓣ	cT Taille	ℓT* Messpunkt cT bis Ferse
		sTv Schritt bis cT vorne sTh Po-Beinfalte bis cT hinten senkrecht nach oben messen
ⓓ	cH Umfang an der breitesten Stelle des Beckens/Gesäß (zwischen Schritt und Taille)	ℓH* Messpunkt cH bis Ferse ℓK* Schritt bis Ferse
ⓖ	cG Etwa Oberschenkelende (zwei Finger breit unterhalb des Schrittes)	ℓG* Messpunkt cG bis Ferse
ⓕ	cF Etwa Oberschenkelmitte	ℓF Messpunkt cF bis Ferse
ⓔ	cE Umfang Kniescheibe–Kniekehle (bei leicht gebeugtem Knie)	ℓE Messpunkt cE bis Ferse, Bein gestreckt
ⓓ	cD Umfang am Tibiakopf (ca. zwei fingerbreit unter der Kniescheibe und der Kniekehle)	ℓD Messpunkt cD bis Ferse
Ⓢ	cC Größter Wadenumfang	ℓC Messpunkt cC bis Ferse
Ⓡ	cB1 Umfang in der Mitte von ℓB und ℓC	ℓB1 Messpunkt cB1 bis Ferse
Ⓡ	cB Fesselumfang (schlankeste Stelle Unterschenkel, kleinster Beinumfang)	ℓB Messpunkt cB bis Ferse
Ⓨ	cY Umfang Ferse-Spann (bei maximaler Beugung des Fußes nach oben)	
Ⓐ	cA Umfang am Kleinzehengrundgelenk	Fußlänge Messpunkt Kleinzehengrundgelenk bis Ferse
		Gesamt- fußlänge Längste Zehenspitze bis Ferse

Bezeichnungen und Kürzel gemäß der RAL (verbindlich seit 01.07.2002) * Maßband am Punkt cD und cF am Bein andrücken

Hinweis zu Kunden mit Halux Valgus und Diabetes

Wir empfehlen eine geschlossene Softspitze, jedoch bei schmerzhafter und/oder veränderten Fußform eine variable Softspitze (BELSANA comfortis).

Anmessen:

- **Geschlossene Softspitze:** cA wird vom Kleinzehengrundgelenk über das Großzehengrundgelenk gemessen (in diesem Fall kann das Maßband etwas schräg liegend, die Fußlänge bleibt gleich)
- **Variable Softspitze:** cA wird hinter dem Halux bzw. hinter dem Groß- und Kleinzehengrundgelenk (Richtung Spann) angelegt; dadurch verkürzt sich die Fußlänge. Die Länge der Softspitze ist variabel (mind. 5 cm max. 10cm).

Zukunft Apotheke ?



Agenda

1. Neuerungen 2025
2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke
3. **„Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“**
4. Modefarben 2026
5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht
6. Austausch


Ausschreibung „Bestes VenenFachCenter“ 2025

- **Thema:** Gestaltung eines BELSANA Schaufensters oder einer BELSANA Werbefläche in der Apotheke unter Nutzung unserer Produkte, Werbemittel und Dekorationen
- **Aufgabe 1:** Erarbeiten Sie ein schriftliches Konzept für ein BELSANA Schaufenster oder eine Werbefläche.
- **Aufgabe 2:** Gestalten und dekorieren Sie ein Schaufenster oder eine andere Fläche in der Apotheke gemäß Ihres Konzepts, unter der kreativen Nutzung von BELSANA Produkten, Werbemitteln und Dekorationen. Halten Sie die fertige Werbefläche auf ansprechenden Bildern oder Videos fest und senden Sie uns das Material zu.

Ausschreibung Bestes VFC 2025

Ergebnis:

1. Platz: Markt-Apotheke, Visbek
2. Platz: Einhorn-Apotheke, Bockenem
3. Platz: Fröbel-Apotheke, Schwarzatal

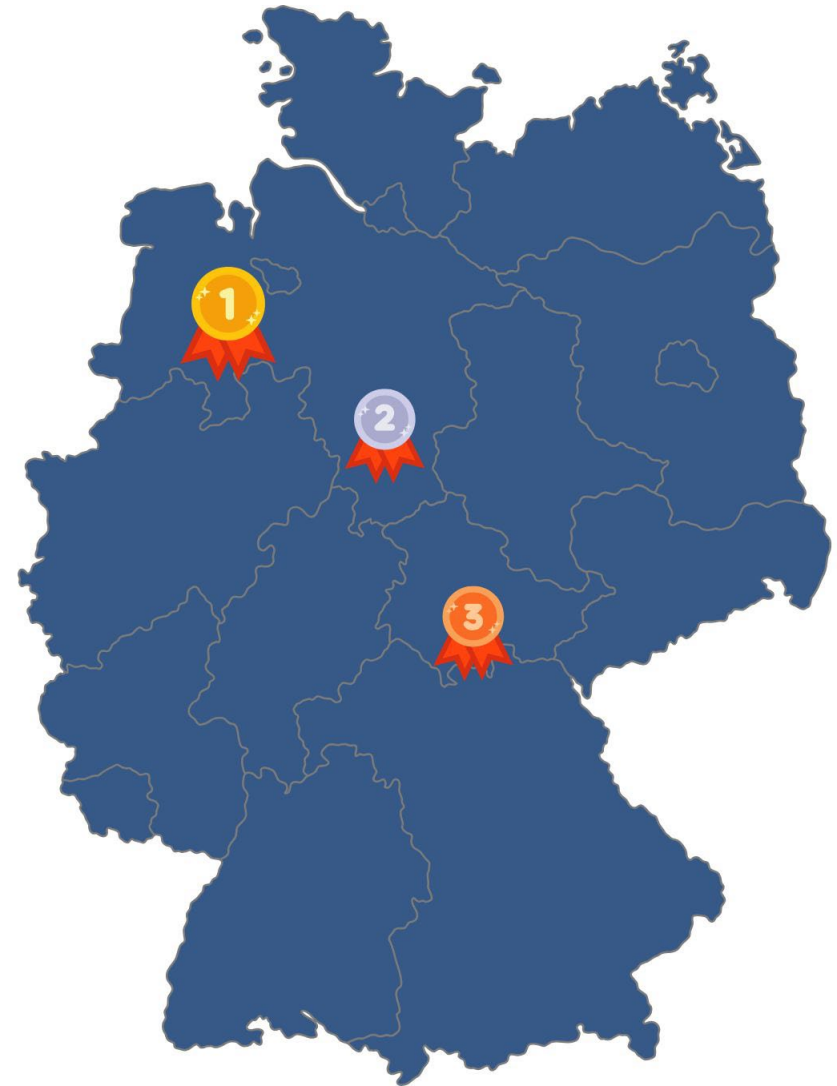

1. Platz: Markt-Apotheke, Visbek



2. Platz: Einhorn-Apotheke, Bockenem



3. Platz: Fröbel-Apotheke, Schwarzatal



Der/die VenenFachBerater/in
ist das Herz des VFC!



Ausblick Ausschreibung „Beste VenenFachBeraterin 2026“


- Wir suchen 2026 die „Beste VenenFachBeraterin Deutschlands“. Der Wettbewerb löst den bisherigen Wettbewerb „Bestes VFC“ ab.
 - Warum machen wir das?
 - Wir geben den VFB die Anerkennung und Aufmerksamkeit für ihre Leistung, die sie verdienen und unterstützen ihre Spezialisierung auf Kompressionsstrümpfe
 - Positiv für die gesamte Apotheke und den Inhaber: Wer geht nicht gerne in die Apotheke mit der besten VFB Deutschlands?
- **Teilnehmen, die Beste VenenFachBeraterin 2026 werden und tolle Preise gewinnen!**

Agenda

1. Neuerungen 2025
2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke
3. „Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“
- 4. Modefarben 2026**
5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht
6. Austausch


Stand der Dinge Modefarben 2025

- Die beliebteste Flachstrick-Modelfarbe 2024/25

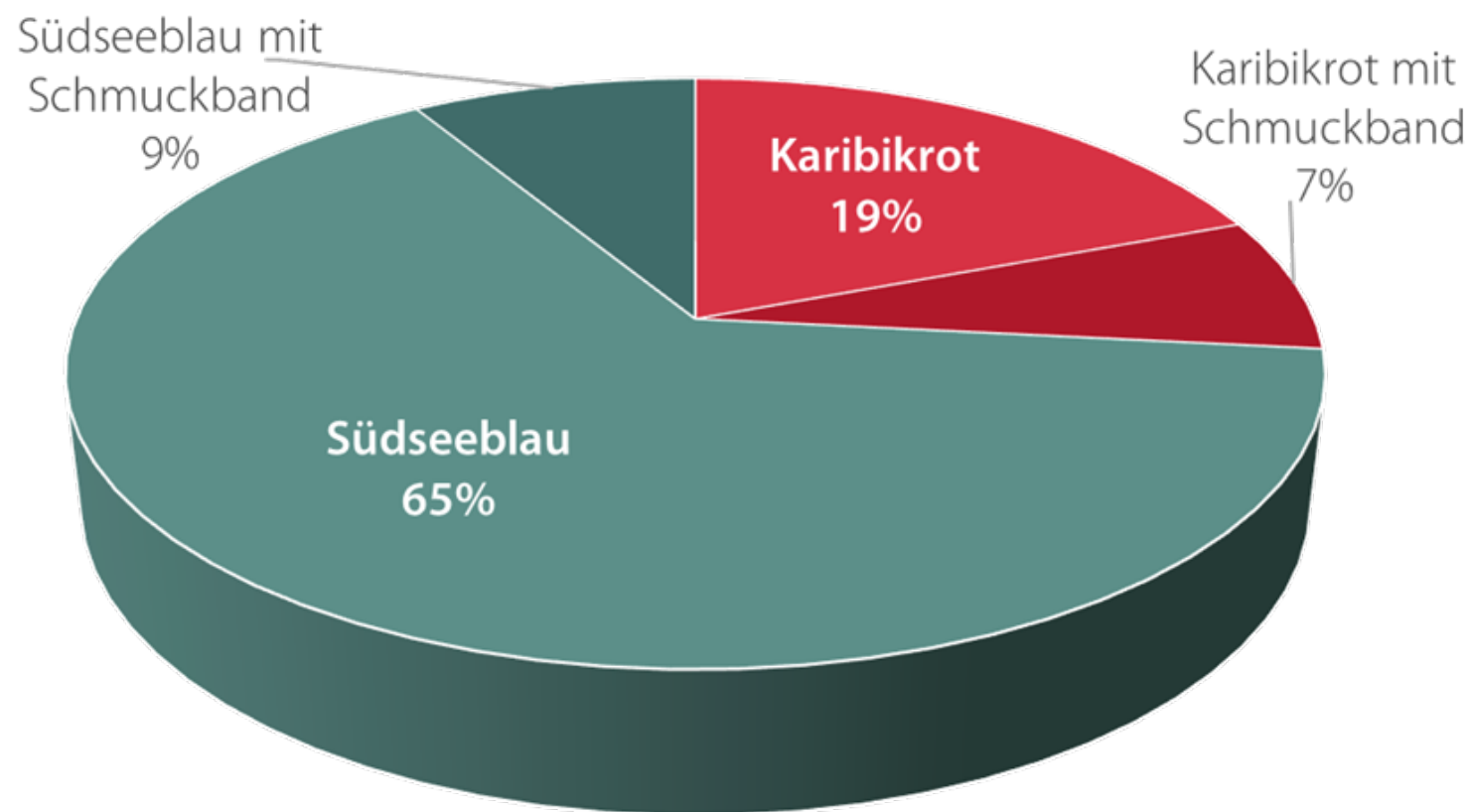

Stand der Dinge Modefarben 2025

- Die beliebteste Rundstrick-Modefarbe 2024/25

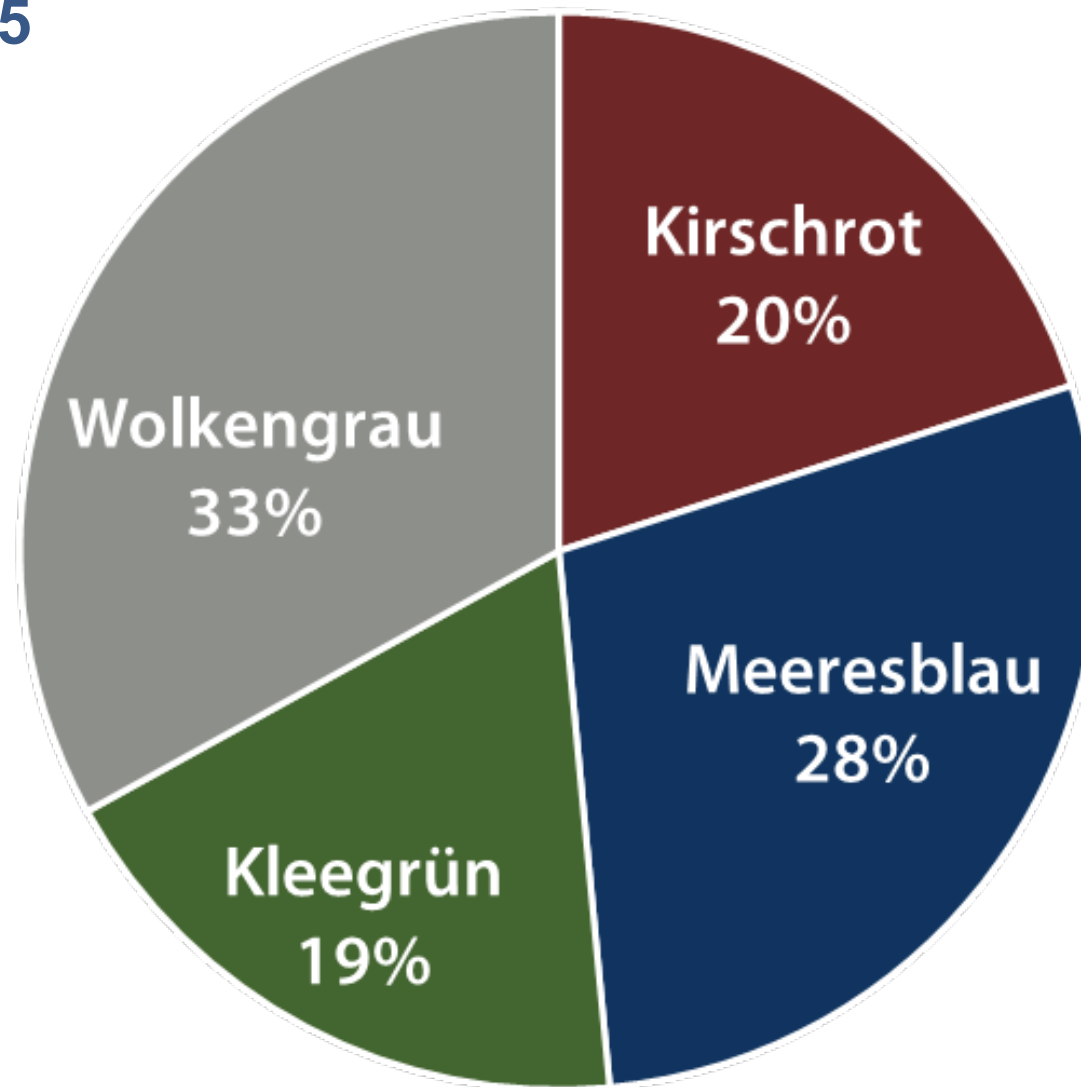

Modefarben 2026 – Impressionen vom diesjährigen Fotoshooting



Ägäisblau

Oleanderrot



Zypressengrün



Sommerpfirsich

Agenda


1. Neuerungen 2025
2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke
3. „Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“
4. Modefarben 2026
- 5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht**
6. Austausch

„Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht






„Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht

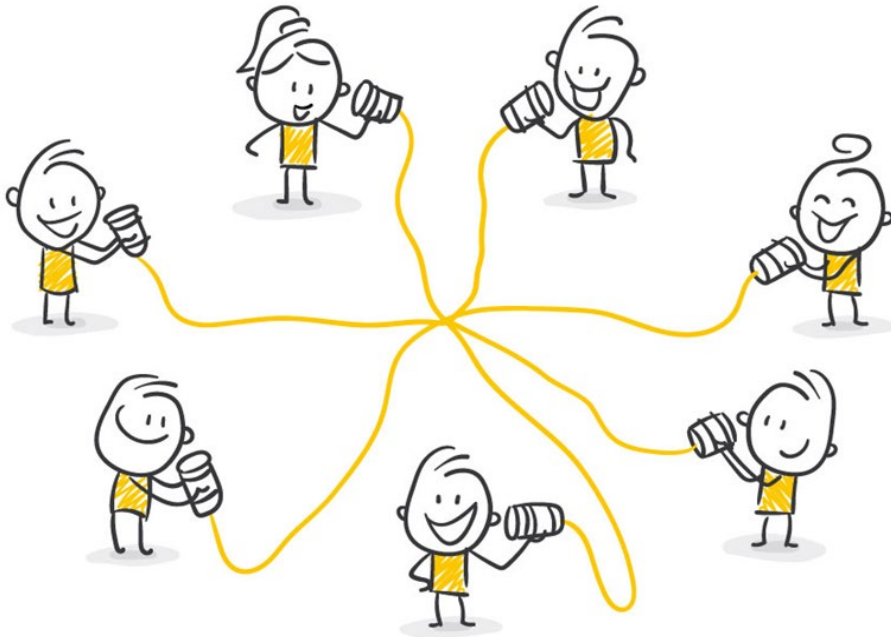

- Jede Gruppe erarbeitet eine andere Anziehtechnik
- Ausarbeitung in der Gruppe: 20 Minuten
- Ergebnisse bzw. Beratungssituation vorstellen
- Vorstellung pro Gruppe: 15 Minuten

„Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht

- 1. Gruppe: Anziehen mit der Arion magnide® 2in1
- 2. Gruppe: Anziehen mit dem BELSANA Engel
- 3. Gruppe: Anziehen nur mit BELSANA gripStar
- 4. Gruppe: Anziehen mit der EasySpring

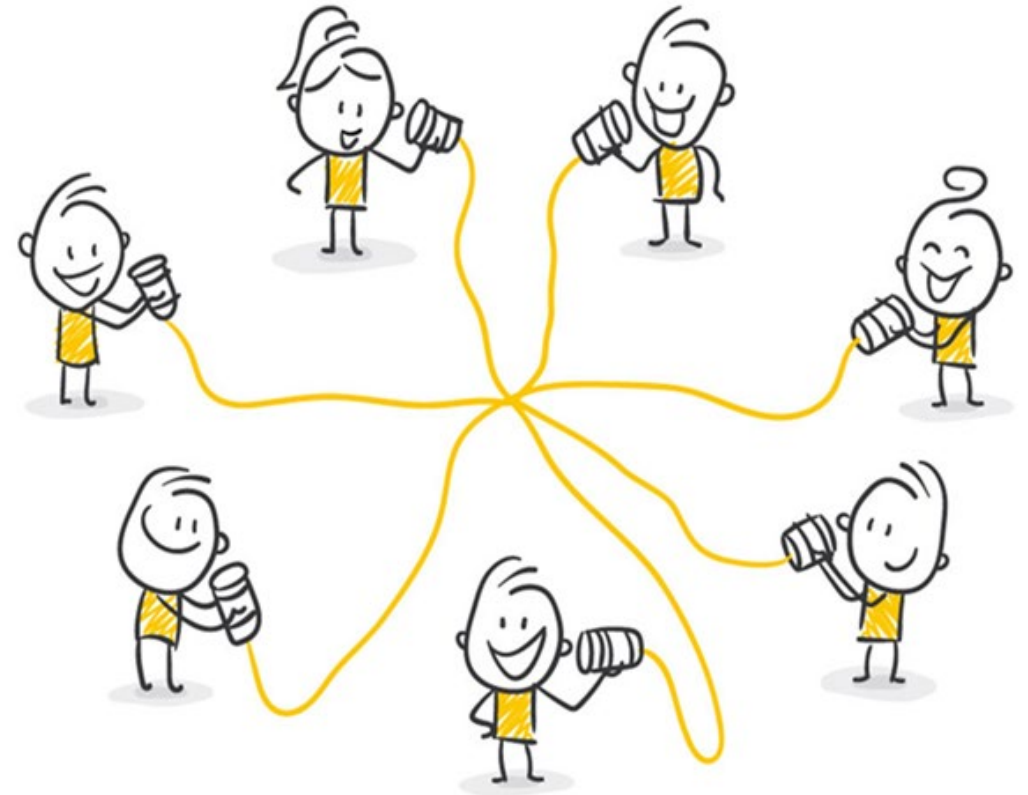

Leitfaden zur Abgabe medizinischer Kompressionsstrümpfe

Medizinischer Kompressionsstrumpf (MKS) wird in die Apotheke angeliefert.

Überprüfung

Übereinstimmung von Patientenname & geliefertem Produkt: Ausführung, Farbe, Qualität, Fußspitze, ggf. Befestigung.

Bei Maßanfertigung:
Maßkarte entfernen.

✓ Alles OK?

✗ Nicht OK?

Rücksprache
mit BELSANA
Tel.: 0951-3093030

Kunden informieren &
Termin zur Anprobe &
Abholung vereinbaren.

**Übergabe der medizinischen
Kompressionsstrümpfe an Ihre
Kundin oder Ihren Kunden.**

Broschüre „Leichter in die Strümpfe
kommen“ (Anziehfibel für MKS) in
der Beratung einsetzen.

Schritt 1:

Callusan Pflegeschaum auftragen! Erleichtert das Anziehen, optimiert Sitz & Tragekomfort.



Schritt 2:

Gemeinsames Anlegen des MKS mit Spezial Handschuh BELSANA grip star.



Schritt 3:

Bei Bedarf Anziehhilfen anwenden. BELSANA magnide, engel & easy spring sind verordnungs- & erstattungsfähig.



Schritt 4:

Überprüfung von korrektem Sitz des medizinischen Kompressionsstrumpfes.

Schritt 5:

Waschanleitung ansprechen. Siehe Gebrauchsanweisung und QR-Codes in Verpackung.



Schritt 6:

Gesetzliche Zuzahlung & ggf. Mehrkostenaufwand berechnen.

Schritt 7:

Unterschrift des Patienten rückseitig auf Rezept.

Schritt 8:

Beratungsdokumentation gemäß SGB V §127.

Hinweis:

Nächste Verordnung spätestens in 6 Monaten!

Gemeinsam sind wir **ERFOLGREICH**



Feedback ErFa Tagung

- Wir freuen uns über Ihr ehrliches und konstruktives Feedback, damit wir unsere ErFas in Zukunft weiter für Sie verbessern können.
- Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

<https://forms.office.com/e/730mSkydTT>

Feedback ErFa Tagung 2025



Agenda

1. Neuerungen 2025
2. Strumpfversorgung als Chance für die Vorort-Apotheke
3. „Bestes VFC 2025“ – Ausblick „Beste VFB 2026“
4. Modefarben 2026
5. „Teamaufgabe“ MKS-Anlegen – leicht gemacht
- 6. Austausch**

Austausch



Wir sagen DANKE ...



... für Ihr Engagement, für Ihr Vertrauen, Ihre Impulse und die gute Zusammenarbeit!

Hier können Sie das Skript herunterladen

